

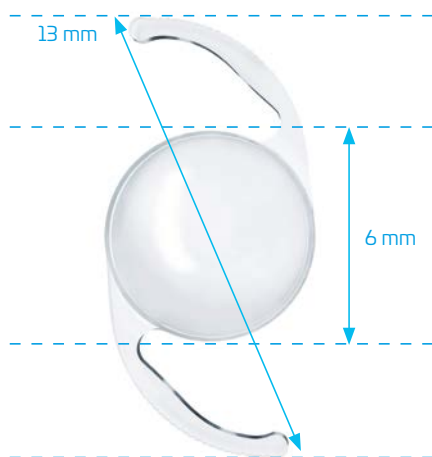


Eye Fold®

IOL en acrylate hydrophobe

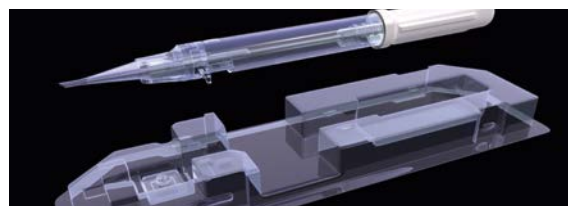

La description suivante constitue un simple résumé des instructions de manipulation et ne se substitue pas au mode d'emploi.

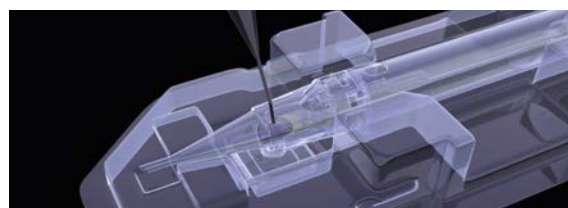

Modèle	Eye Fold®
Filtre	Filtre UV
Matériau	Acrylique hydrophobe
Type d'optique	sphérique
Production	Lathe-cut
Puissances	0,0 à +34,0 par incréments de 0,5 D
Diamètre optique	6,0 mm Zone optique
Diamètre total	13,00 mm
Design d'haptique	Anse en C modifiée
Constante A*	118,2 (nominale)
Injecteur	Prosert
Diamètre extérieur de la pointe d'injecteur avant	1,78 mm

*La constante A sert de base au calcul de la puissance des lentilles. Il est conseillé de l'adapter à la situation individuelle, en fonction de l'expérience du chirurgien et de l'équipement utilisé.

Étape 1 : humectage

Au début de la phase d'aspiration, insérez le matériau viscoélastique à travers l'ouverture d'injection afin de l'humecter correctement. L'injecteur reste dans le support.

Étape 2 : préparation de l'implantation

Retirez l'injecteur du support lorsque l'opérateur est prêt à effectuer l'implantation.

Étape 3 : implantation

Poussez la IOL en faisant tourner lentement la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre en direction de l'embout de l'injecteur, jusqu'à ce que l'haptique antérieure atteigne l'angulation (Bevel). Enfoncez profondément l'embout de l'injecteur dans le sac capsulaire à travers l'incision, avec la fente vers le bas (Bevel Down), et déposez la lentille dans le sac capsulaire en faisant tourner doucement la poignée.

Coordonnées :

OPHTHALMO Pro GmbH
Im Reihersbruch 1, 66386 Sankt Ingbert
Propriétaire Thomas Zimmer
Tél. : +49 (68 94) 99 88 770
Fax : +49 (68 94) 99 88 777
E-mail : office@ophthalmo-pro.de
www.ophthalmo-pro.de/fr